

Dispositifs pris en charge

Voici une liste des dispositifs pris en charge par l'application Web OneTouch Reveal® à la date de publication du présent manuel d'utilisation. Vous pouvez transférer des données depuis ces dispositifs grâce aux instructions de connexion fournies dans le tableau. Ce tableau sert également de référence sur les caractéristiques et fonctions accessibles pour chaque dispositif pris en charge.

Dispositif	Génération de tendances	Effacement des données du dispositif	Synchronisation des horloges	Détection de dates futures	Détection de dates mixtes	Mac	Instructions de connexion
Lecteur distant OneTouch Ping®	X	X	X	X		X	Allumez-le, puis connectez-le.
OneTouch Ultra®2	X	X	X	X	X	X	Éteignez-le, puis connectez-le.
OneTouch UltraMini®	X	X	X	X	X	X	Éteignez-le, puis connectez-le.
OneTouch UltraSmart®	X	X	X	X		X	Connectez le lecteur au câble; connectez ce câble au PC, puis appuyez sur le bouton noir à gauche.
OneTouch Verio Flex ^{MC}	X	X	X	X	X	X	Éteignez-le, puis connectez-le.
OneTouch Verio®IQ	X	X	X	X	X	X	Éteignez-le, puis connectez-le.
OneTouch Verio®	X	X	X	X	X	X	Éteignez-le, puis connectez-le.
Animas®Vibe®	X			X	X	X	La pompe doit être en veille; aucune tubulure n'est connectée.
Animas® 2020	X			X	X	X	La pompe doit être en veille; aucune tubulure n'est connectée.
Gestionnaire personnel de diabète OmniPod®				X	X	X	Assurez-vous que le gestionnaire personnel du diabète Gestionnaire personnel de diabète OmniPod® est allumé et connectez le dispositif à votre ordinateur.
OneTouch Ping®	X			X	X	X	La pompe doit être en veille; aucune tubulure n'est connectée.

Configuration système requise

Pour utiliser l'application Web OneTouch Reveal®, votre ordinateur doit être équipé d'une connexion Internet de 256 Ko/s ou plus (connexion Internet haute vitesse ou haut débit). Il doit également satisfaire aux exigences indiquées ci-dessous. Pour les dispositifs ne figurant pas dans la liste, veuillez vous reporter aux informations fournies par le fabricant de votre dispositif.

Configuration matérielle requise

- Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10
- Mac OS® X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
- Affichage avec résolution d'écran minimale de 1024 x 768 pixels
- Imprimante noir et blanc ou couleur dotée d'une résolution minimale de 300 points par pouce (pour imprimer des rapports)
- Lecteur de glycémie, pompe à insuline ou pompe à insuline avec dispositif intégré de surveillance du glucose en continu (SGC) pris en charge
- Câbles de connexion recommandés par le fabricant du dispositif

Configuration logicielle requise

Les logiciels et programmes suivants doivent être installés sur votre ordinateur :

- Pour Microsoft® Windows®, l'un des navigateurs Web suivants :
 - Mozilla Firefox® 11+
 - Google Chrome™ 17+
 - Internet Explorer® 9+
 - Microsoft Edge®
- Pour Mac OS®, l'un des navigateurs Web suivants :
 - Mozilla Firefox® 11+
 - Safari® 7+
- Adobe® Reader® 10+

Les dispositifs suivants doivent être installés pour transférer les données du dispositif du patient :

- OneTouch Reveal® Outil de transfert des données